

2020年5月25日

各位

レンティス コンフォート A 定数等の変更のお知らせにつきまして

いつも弊社製品をご愛顧くださり心より御礼申し上げます。  
新型コロナウイルスの感染拡大の影響が続く中でございますが、一日も早い終息と、先生ならびにスタッフの皆様のご健康を心よりお祈り申し上げる次第です。

このたび、レンティス コンフォートの度数計算に用いる A 定数等の変更についてご案内をさせていただきました。度数計算式ごとの定数につきましては、同封の Santen Surgical Information No.68「レンティス コンフォート A 定数等変更のお知らせ」をご覧ください。

レンティス コンフォートは、新発売から約1年が経過いたしました。既に学会発表、弊社共催セミナー、Web 講演会等を通じまして、複数の先生方より術後の近視化傾向についてご報告をいただいております。弊社といたしましては、いただいた臨床報告をもとに、セミナーや講演会の記録集を発行しご案内を実施して参りました。

このような中、製造元の Oculentis 社（オランダ）より A 定数の変更についての通知が弊社宛に参りましたことから、今回ご案内させていただいた次第です。

本来であれば、拝眉の上詳しくご説明を申し上げるべきところでございますが、緊急事態宣言以降、訪問活動の自粛をさせていただいておりますこと、既に製造元（Oculentis 社）ではホームページ上で変更後の A 定数等の告知を行っておりますことから、タイムラグを設けぬようご案内させていただくべきとの判断に至り、書面でのご案内をさせていただいた次第です。

新型コロナウイルスの感染拡大が終息し、訪問自粛の解除がなされた際には直接補足説明をさせていただく所存ですので、当面はこれまで通り貴院でのパーソナル定数を用いての度数決定をご継続いただきますことを推奨申し上げます。

本件につきましてのお問い合わせ等は以下へお願い申し上げます。折り返し、営業担当よりご連絡をさせていただければと存じます。

以上、お手紙のご案内となり誠に恐縮でございますが、ご了承のほどお願い申し上げます。今後とも弊社製品をご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

本件に関するお問い合わせ先  
参天製薬株式会社製品情報センター  
TEL 0120-921-839 06-6321-7056  
受付時間 9:00~17:00（土・日・祝日を除く）

参天製薬株式会社眼科事業部  
サージカルマーケティンググループ  
グループマネージャー 大塚正紀

高度管理医療機器 多焦点後房レンズ(35658300)

# レンティス コンフォート A 定数等変更のお知らせ

平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。さて、このたび標記製品につきまして、下記のとおりを変更いたしますのでお知らせ申し上げます。

記

## ■変更内容

レンティス コンフォートの光学式の A 定数等\*を変更します。なお、超音波式の A 定数の変更はありません。

項目	現行	変更後
SRK/T	A = 118.5	A = 118.32
SRK II	A = 118.6	A = 118.5
Holladay1	sf = 1.47	sf = 1.38
HofferQ	pACD = 5.21	pACD = 5.15
Haigis	a0 = 0.95	a0 = 1.019
	a1 = 0.40	a1 = 0.309
	a2 = 0.10	a2 = 0.107

\*A 定数等は参考値です。挿入レンズ度数を厳密に算定する場合には、使用装置や、経験等に基づき、独自の数値を計算して下さい。

## ■変更理由

このたび、当該製品の製造元であるオキュレンティス社（本社：オランダ）より、臨床成績に基づいた A 定数等の最適化情報（IOL Con (<https://iolcon.org>））を参考として、A 定数等の数値を変更したとの通知を受けましたことより、ご案内させていただくことといたしました。

お問い合わせ先  
参天製薬株式会社 製品情報センター  
大阪市北区大深町4-20  
<http://www.santen.co.jp>  
TEL 0120-921-839 06-6321-7056  
受付時間 9:00~17:00（土・日・祝日を除く）